



1 CONDUIT™ ATP Handle

2 Assembly / Disassembly Instructions

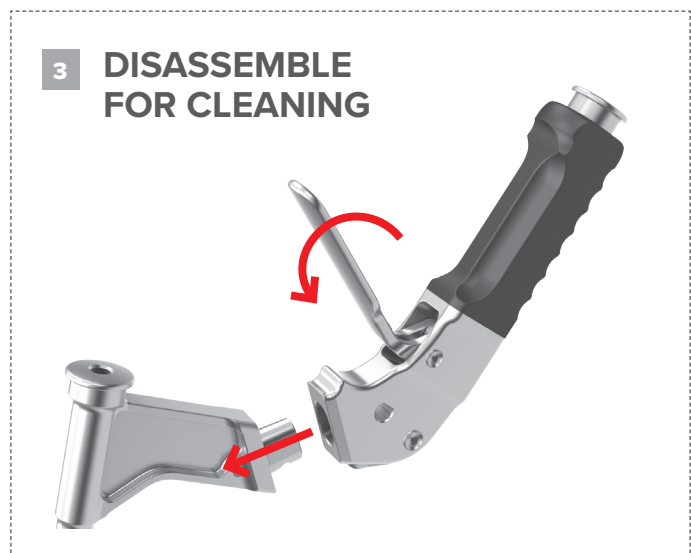

1 LET30400T
CONDUIT™ ATP HANDLE

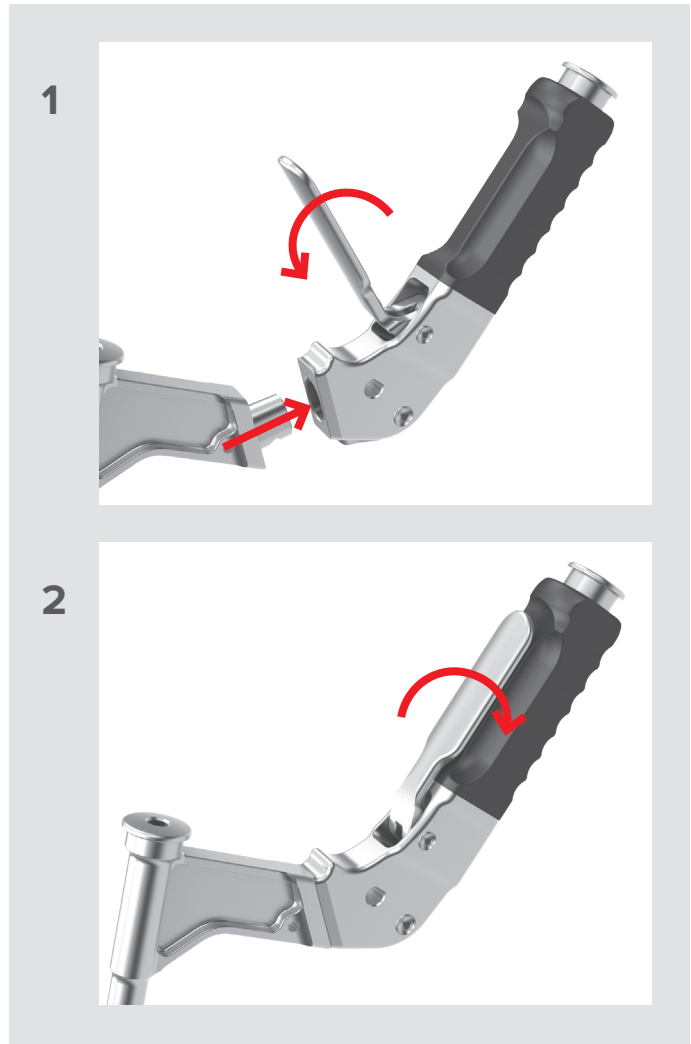

1
2
3

| EN | ENGLISH | CONDUIT™ ATP Handle | ASSEMBLY / DISASSEMBLY INSTRUCTIONS | DISASSEMBLE FOR CLEANING |
|----|--------------------|-----------------------|--|--|
| BG | БЪЛГАРСКИ | Дръжка CONDUIT™ ATP | Инструкции за сглобяване/разглобяване | да се разглоби за почистване |
| ES | ESPAÑOL | Mango CONDUIT™ ATP | Instrucciones de montaje/desmontaje | desmontar para limpiar |
| CS | ČESKY | Rukojeť CONDUIT™ ATP | Pokyny pro montáž/demontáž | demontáž pro čištění |
| DA | DANSK | CONDUIT™ ATP-håndtag | Anvisninger i samling/adskillelse | adskillelse i forbindelse med rengøring |
| DE | DEUTSCH | CONDUIT™ ATP-Griff | Montage-/Demontageanleitung | für die Reinigung zerlegen |
| ET | EESTI KEEL | CONDUIT™ ATP käepide | Lahtivõtmise ja kokkupaneku juhised | lahtivõtmise puhastamiseks |
| EL | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | CONDUIT™ Ααβή ATP | Οδηγίες συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης | αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό |
| FR | FRANÇAIS | Poignée ATP CONDUIT™ | Instructions pour le montage/démontage | démonter pour nettoyer |
| HR | HRVATSKI | CONDUIT™ ATP, ručica | Upute za sastavljanje/rastavljanje | rastaviti radi čišćenja |
| IT | ITALIANO | Maniglia CONDUIT™ ATP | Istruzioni di montaggio/smontaggio | disassemblare per le operazioni di pulizia |
| LV | LATVIEŠU | CONDUIT™ ATP rokturis | Montāžas/ demontāžas instrukcijas | izjaukt tīrīšanai |
| LT | LIETUVIŲ | CONDUIT™ ATP rankena | Surinkimo / išardymo instrukcijos | prieš valant išardyti |
| HU | MAGYAR | CONDUIT™ ATP markolat | Összeszerelési/szét szerelési utasítások | tisztításhoz szerezje szét |
| NL | NEDERLANDS | CONDUIT™ ATP-handvat | Montage- / demontage-instructies | demonteren voor reiniging |
| NO | NORSK | CONDUIT™ ATP-håndtak | Montering-/demonteringsanvisning | demonteres for rengjøring |
| PL | POLSKI | Uchwyt CONDUIT™ ATP | Instrukcje montażu/demontażu | zdemontować do czyszczenia |
| PT | PORTUGUÊS | Pega de ATP CONDUIT™ | Instruções de montagem/desmontagem | desmonte para limpar |
| RO | ROMÂNĂ | Mâner CONDUIT™ ATP | Instrucțiuni de asamblare/demontare | dezasamblați pentru curățare |
| SK | SLOVENČINA | CONDUIT™ Rukovät ATP | Pokyny na montáž/demontáž | rozobrat na čistenie |
| SL | SLOVENŠČINA | Ročaj CONDUIT™ ATP | Navodila za sestavljanje/razstavljanje | razstavite za čiščenje |
| FI | SUOMI | CONDUIT™ ATP kahva | Kokoamis- ja purkuohjeet | pura puhdistusta varten |
| SV | SVENSKA | CONDUIT™ ATP-handtag | Anvisningar för montering/isärmontering | demontera för rengöring |
| TR | TÜRKÇE | CONDUIT™ ATP Kolu | Montaj/Sökme talimatları | temizlik için sökün |