
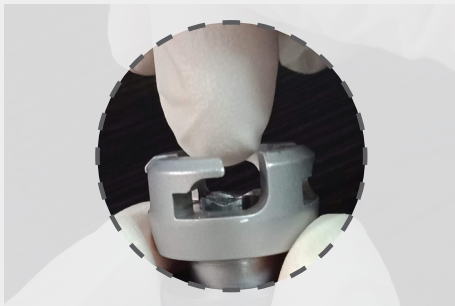



1 Angled Reamer Driver

2 Cleaning Instructions

3 PRE CLEANING

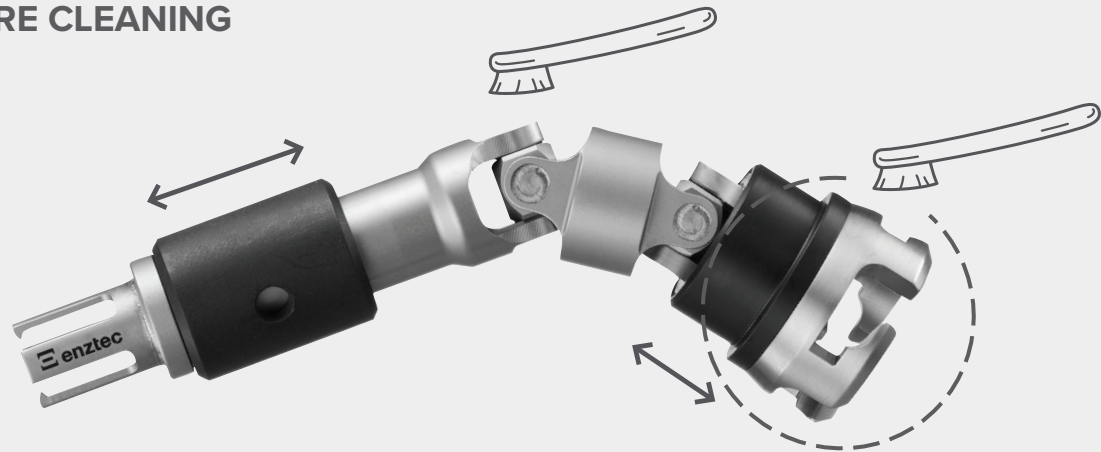

4 POST CLEANING LUBRICATION

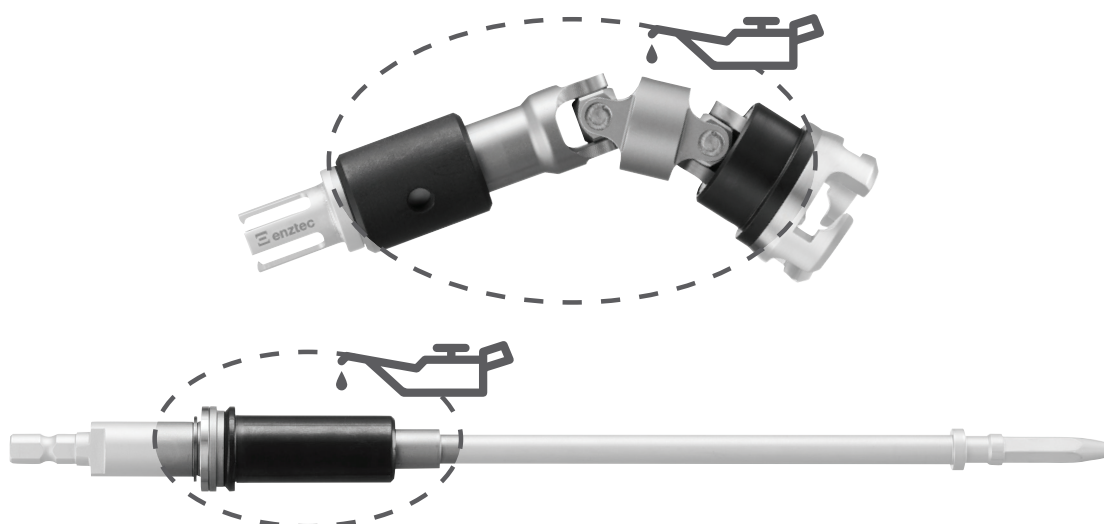

Angled Reamer Driver



	1	2	3	4
EN	ENGLISH	Angled Reamer Driver	Cleaning Instructions	Post Cleaning Lubrication
BG	БЪЛГАРСКИ	Водач за разширител Enztec, ъглов	Инструкции за почистване	Смазване след почистване
ES	ESPAÑOL	Impulsor del escariador en ángulo	Instrucciones de limpieza	Lubricación postlimpieza
CS	ČESKY	Úhlový zavaděč vrtáku	Pokyny k čištění	Mazání po vyčištění
DA	DANSK	Vinklet fræser-driver	Rengøringsanvisninger	Smøring efter rengøring
DE	DEUTSCH	Winkelreibahlantrieb	Reinigungsanleitung	Schmierung nach der Reinigung
ET	EESTI KEEL	Enztec'i nurgaga freesisesti	Puhastusjuhised	Puhastusjärgne määrimine
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Γωνιώδης οδγός γλυφάνου	Οδηγίες καθαρισμού	Λίπανση μετά τον καθαρισμό
FR	FRANÇAIS	Porte-fraise coudé	Instructions de nettoyage	Lubrification après le nettoyage
HR	HRVATSKI	Enztec zakrivljeno svrdlo razvrtača	Upute za čišćenje	Podmazivanje nakon čišćenja
IT	ITALIANO	Guida alesatore angolato	Istruzioni per la pulizia	Lubrificazione dopo la pulizia
LV	LATVIEŠU	Enztec lenķveida paplašinātāja skrūvgriezis	Tīrīšanas instrukcijas	Eļļošana pēc tīrīšanas
LT	LIETUVIŲ	„Enztec“ kampinio plėstuvo sužadintuvas	Valymo instrukcijos	Tepimas išvalius
HU	MAGYAR	Hajlított maróbehajtó	Tisztítási utasítások	Tisztítás utáni kenés
NL	NEDERLANDS	Gehoekte bedieningshendel voor frees	Reiniging instructies	Smering na reiniging
NO	NORSK	Vinklet reamerdriver	Rengjøringsinstruksjoner	Smøring til etter rengjøring
PL	POLSKI	Zakrzywiony prowadnik rozwiertaka firmy	Instrukcje czyszczenia	Smarowanie po czyszczeniu
PT	PORTUGUÊS	Chave do escareador em ângulo	Instruções de limpeza	Lubrificação após a limpeza
RO	ROMÂNĂ	Dispozitiv de acționare alezor înclinat Enztec	Instrucțiuni de curățare	Lubrifiere după curățare
SK	SLOVENČINA	Pohon uhlového výstružníka	Pokyny na čistenie	Mazanie po čištenju
SL	SLOVENŠČINA	Ukrivljeno vodilo povrtala	Navodila za čiščenje	Mazanie po vyčistení
FI	SUOMI	Taivutettu riimeriohjain	Puhdistusohjeet	Puhdistuksen jälkeinen voitelu
SV	SVENSKA	Vinklad drivenhet till brotsch	Rengöringsanvisningar	Smörjning efter rengöring
TR	TÜRKÇE	Enztec açılı oyucu sürcüsü	Temizleme talimatları	Temizlik sonrası yağlama

